

## Gebrauchsanweisung für Sonderanfertigungen

### Individuelle orthopädische / sensomotorische Einlagen

Sie haben vom Orthopädiehaus Blaschke eine für Sie individuell hergestellte Einlage erhalten. Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung aufmerksam durch. Sie enthält wichtige Informationen und Sicherheitshinweise.

Das Orthopädiehaus Blaschke hat für Sie eine maßgefertigte, orthopädisch-funktionell-aktive Einlage gefertigt. Bei diesem Hilfsmittel handelt es sich um eine Sonderanfertigung, die nur für Ihren persönlichen Bedarf und auf Verordnung Ihres behandelnden Arztes hergestellt wurde. Einlagen sind funktionelle Orthesen zur Vorbeugung und Behandlung von Beschwerden des Muskel-Skelett-Apparates oder bei systemischen Erkrankungen (z.B. Diabetes mellitus). Sie dienen der Korrektur von Gelenken der unteren Extremitäten sowie des Rumpfes, zur Minderung von Haltungsdefiziten des Bewegungsapparates, zur Lastenverteilung und Bettung der Fußweichteile bei vorliegenden Deformitäten. Einlagen sind den Gegebenheiten des Fußes individuell anzupassen und nur zur Verwendung mit gesunder und unverletzter Haut.

Das Produkt wurde mit größter Sorgfalt gefertigt und vor der Abgabe an Sie eingehend geprüft.


#### Anwendung

- Einlagen nur in dafür geeignetem Schuhwerk tragen.
- Schuhe und Einlagen müssen aufeinander abgestimmt sein.
- Einlagen müssen stets mit Strümpfen getragen werden.
- Bei Problemen mit der Einlage umgehend das Orthopädiehaus Blaschke kontaktieren.
- Bei erstmaliger Einlagenversorgung sollten Einlagen nur stundenweise eingetragen und die Tragezeit später gesteigert werden:

#### Tragezeiten

Halten Sie bitte folgende Tragezeiten beim Erstgebrauch ein:

- |                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| 1. Tag vormittags: 15 Minuten  | 1. Tag nachmittags: 30 Minuten |
| 2. Tag vormittags: 60 Minuten  | 2. Tag nachmittags: 90 Minuten |
| 3. Tag vormittags: 180 Minuten |                                |

	<b>GA_Sonderanfertigung_orthopädische_ Einlagen</b>	<b>Blaschke GmbH und Co.KG</b>
---	---	--------------------------------

## Hinweise für Einlagenversorgungen in Arbeitsschutzschuhen

- Das Tragen von orthopädischen Einlagen in Sicherheitsschuhwerk ist nur mit speziellen Einlagen laut BGR 191/DGUV 112-191 gestattet. Einlagen für Alltags- und Freizeitschuhe dürfen nicht in Arbeitsschutzschuhen getragen werden.
- Sofern Sie von uns orthopädische Einlagen für Arbeitsschutzschuhe erhalten haben, dürfen diese ausschließlich in den Arbeitsschutzschuhen getragen werden, an die die Einlagen individuell angepasst wurden.


## Pflege (Reinigung, Desinfektion)

- Zur hygienischen Pflege können die mit einem feuchten Tuch gereinigt werden.
- Die Einlage nicht im Trockner, auf der Heizung oder mit anderen direkten Wärmequellen trocknen. Dies kann zu unerwünschten Materialveränderungen und Passformverlust führen.
- Lederbezogene Einlagen zum Lüften aus dem Schuh nehmen und schonend trocknen.
- Bei starken Verschmutzungen oder Kontakt mit Körpersekreten müssen die Oberflächenbezüge ersetzt werden, da eine ausreichende Desinfektion nicht sichergestellt werden kann.
- Für Medizinprodukte aus Kunststoff nur handelsübliche Flächendesinfektion verwenden.
- Der Kontakt mit Säuren oder Lösungsmitteln muss vermieden werden.
- Sollten sich Veränderungen am Material zeigen, kontaktieren Sie umgehend Ihren Techniker vom Orthopädiehaus Blaschke.
- Die Einlagen sollten in regelmäßigen Abständen von Ihrem Techniker des Orthopädiehaus Blaschke kontrolliert werden. Insbesondere bei Kindern im Wachstum oder bei speziellen Indikationen.

## Lebensdauer/ Kontrolle

Dieses Produkt hat eine mittlere Lebensdauer von 12 Monaten. Diese Lebensdauer kann in Abhängigkeit verschiedener Einflussfaktoren wie z.B. Nutzungsintensität, Wachstum, körperliche Veränderungen oder Indikationsänderungen variieren. Innerhalb dieser Lebensdauer ist das Hilfsmittel wartungsfrei. Sollten das Hilfsmittel über die von uns empfohlene Lebensdauer hinaus nutzen wollen, empfehlen wir eine Überprüfung der Funktionsfähigkeit. Bitte vereinbaren Sie mit uns vorab einen Termin, wenn eine planbare Reparatur oder Kontrolle ihres Hilfsmittels erforderlich sein sollte.

Version: 1.0	Freigegeben:	Von GF	
Bezeichnung: GA_Sonderanfertigung_orthopädische_Einlagen		ID: OST0002	Seite 2 von 3

ORTHOPÄDIEHAUS <b>BLASCHKE</b> 	GA_Sonderanfertigung_orthopädische_ Einlagen	<b>Blaschke GmbH und          Co.KG</b>
---	---	---

### Entsorgung

- Die Einlagen können gemäß den örtlichen Bestimmungen im normalen Hausmüll entsorgt werden.

### Haftung

- Unsere Haftung erstreckt sich ausschließlich auf das Produkt, in der von uns abgegebenen Ausführung. Bei Veränderungen durch Dritte erlischt der Rechts- und Garantieanspruch.

Version: 1.0	Freigegeben:	Von GF	
Bezeichnung: GA_Sonderanfertigung_orthopädische_Einlagen		ID: OST0002	Seite 3 von 3