

Gebrauchsanweisung für Sonderanfertigungen

Orthopädische Maßschuhe - Schuhzurichtung - Diabetesadaptierte Fußbettung - Therapieschuhe

Sie haben vom Orthopädiehaus Blaschke ein für Sie individuell hergestelltes orthopädiesschuhtechnisches Hilfsmittel erhalten. Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung aufmerksam durch. Sie enthält wichtige Informationen und Sicherheitshinweise.

Bei erstmaliger Versorgung sollten die Hilfsmittel nur stundenweise eingetragen und die Tragezeit später gesteigert werden:

Tragezeiten

Halten Sie bitte folgende Tragezeiten beim Erstgebrauch ein:

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| 1. Tag vormittags: 15 Minuten | 1. Tag nachmittags: 30 Minuten |
| 2. Tag vormittags: 60 Minuten | 2. Tag nachmittags: 90 Minuten |
| 3. Tag vormittags: 180 Minuten | |

Vor jedem Gebrauch der Schuhversorgung ist der Schuhinnenraum auf etwaige Fremdkörper abzutasten und sofern solche vorhanden sein sollten, sind diese zu entfernen.

Führen Sie nach jedem Trageintervall eine Sichtkontrolle beider Füße durch.


Ab dem 3. Tag mittags ist die Tragezeit unbegrenzt bei regelmäßiger abendlicher Sichtkontrolle beider Füße, wenn erforderlich unter Zuhilfenahme eines Spiegels für die Fußsohle und die Ferse.

Beginnt die Ersttragezeit am Nachmittag, verschieben sich die Tragezeiten entsprechend.

Sollten Hautrötungen oder Reizungen auftreten, setzen Sie sich bitte unmittelbar mit uns oder Ihrem Arzt in Verbindung.

Pflegehinweise

Bei Durchfeuchtung des Hilfsmittels trocknen Sie es langsam und nicht auf Heizung oder Ofen. Achten Sie auf scharfe Kanten und Druckstellen, die durch das Trocknen entstehen können. Benutzen Sie keine scharfen oder ätzenden Flüssigkeiten zum Reinigen des Hilfsmittels. Pflegen Sie das Oberleder mit hochwertigen Schuhpflegemitteln, damit es weich und geschmeidig bleibt.

ORTHOPÄDIEHAUS BLASCHKE 	GA_OST_Sonderanfertigung_Maßschuhe_Schuh zurichtung_diab._Fußbettung_Therapieschuhe	Blaschke GmbH und Co.KG
---	--	--

Wartungsintervalle

Für die diabetesadaptierte Fußbettungen empfehlen wir Kontrollintervalle von 6 Monaten, für orthopädische Schuhe von 12 Monaten. Im Interesse Ihrer eigenen Sicherheit, sollten Sie die Wartungsintervalle einhalten, um Schäden an Ihrem Hilfsmittel zu vermeiden. Bei Nichteinhaltung der Wartungstermine oder Veränderungen am Produkt durch Dritte ist die Haftung in Schadensfällen eingeschränkt oder erlischt völlig.

Entsorgung

- Die Hilfsmittel können gemäß den örtlichen Bestimmungen im normalen Hausmüll entsorgt werden.

Haftung

- Unsere Haftung erstreckt sich ausschließlich auf das Produkt, in der von uns abgegebenen Ausführung. Bei Veränderungen durch Dritte erlischt der Rechts- und Garantieanspruch.

Version: 1.0	Freigegeben:	Von GF
Bezeichnung:GA_OST_Sonderanfertigung_Maßschuhe_Schuhzurichtung_diab._Fußbettung_Therapieschuhe	ID: OST0001	Seite 2 von 2